

生理食塩水(NaCl-0.85% - T)*For microbiological control only*

Saline Solution (NaCl-0.85% - T)

希釈液

42113 **試験管** 100本(9ml)**貯蔵法**

2-25

組成(g/l)塩化ナトリウム..... 8.5
pH6-10

(問い合わせ先)

製品関連

シスメックス株式会社 CSセンター

臨床(病院、臨床検査センターなど) TEL: 0120-265-034

産業(企業、保健所など) TEL: 0120-022-328

注文・納期・在庫関連

シスメックス・ビオメリュー株式会社

TEL: 03-6834-2666(代表)

原理

この0.85%等張生理食塩水は菌液調製用あるいは希釈用として推奨されています。

0.85%の塩化ナトリウム濃度により浸透圧のバランスが保たれるとともに、等張液となっています。

使用法

1. **試験管を室温に戻します。**
2. 試験室にて採用している標準法に記載された方法に従い、希釈を行います。

注意:微生物または懸濁液は、生理食塩水に20分以上さらさないで下さい。**使用上の注意**

- 無菌操作および細菌を取扱う上で必要な注意事項に留意して下さい。
- 検体、培養物などは全て感染の可能性があるものとして取り扱いには充分ご注意下さい。安全ガイドライン：“NCCLS M-29A, Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue; Approved Guideline – Current revision” 操作留意事項“Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - CDC/NIH – Latest edition”または各国の最新のガイドラインに従って下さい。
- 有効期限切れの製品は使用しないで下さい。
- コンタミしている製品は使用しないで下さい。
- 使用前に、試験管のキャップに破損がないことをご確認下さい。

廃棄処理

起こりうる危険を適切に考慮の上、使用者の責任の元、廃棄産物や流出産物はそれぞれの危害毒性や度合いを考慮し、地域の適切な規制に従って廃棄して下さい。

**シスメックス・ビオメリュー株式会社**東京都品川区大崎一丁目2番2号
大崎セントラルタワー8階**bioMérieux sa**

69280 Marcy-l'Etoile / France

Tel. (33) 0 4 78 87 20 00 / Fax (33) 0 4 78 87 20 90

<http://www.biomerieux.com>

The logo is a registered and protected trademark of bioMérieux sa or one of its subsidiaries.